


# Terhességi teszt használati utasítás

## Hogyan működnek a korai terhességi tesztszettek?

A korai terhességi tesztszettek a humán koriongonadotropin (hCG) vizeletben lévő mennyiségének kimutatásával határozzák meg a fogantatást. A hCG hormont a méhlepény állítja elő már a teherbeesés utáni 3. naptól kezdve. Pontos eredményre számíthat az ovuláció után 10 nappal végzett tesztesetek.

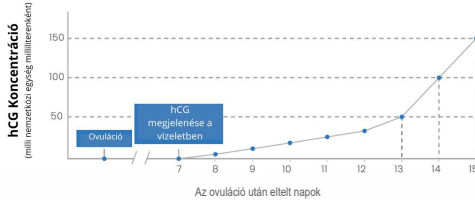

## Mikor kell elkezdni a tesztelést?

Sok nőnél a hCG kimutatható ezzel a teszttel az ovuláció után 10-14 nappal. Hamis negatív leolvások fordulhatnak elő, ha a vizsgálatot túl korán végzik el.

*Megjegyzés: Az első reggeli vizeletminta ideális, mert magasabb koncentrációban tartalmaz hCG-t*

OVULÁCIÓ ÓTA ELTELT NAPOK	7	8	9	10	11	12	13	14
	TÚL KORAI			AJÁNLOTT				

## Hogyan kell használni?

1. Vegye ki a tesztszettek a lezárt tasakból.

2. Tartsa függőlegesen a tesztszettek, és mártsa be úgy, hogy a nyíl a minta felé mutasson.

*Megjegyzés: Ne merítse a csíkot a Max vonalon túlra, különben az eredmény érvénytelen lesz*

3. 5 másodperc elteltével húzza ki a tesztszettek, és helyezze tiszta, száraz, nem nedvszívó felületre.

4. Értelmezze a teszteredményeket 5 percen belül.

*Megjegyzés: Az tesztleolvasása 5 perc elteltével hamis eredményt mutathat.*




## Eredmények értelmezése

**Pozitív:** Két piros vonal jelenik meg, egy a teszt régióban (T) és egy a kontroll régióban (C). Valószínű, hogy Ön várandós.

**Negatív:** Egy piros vonal jelenik meg a kontroll régióban (C). Nincs látható nyom a teszt régióban (T). Ön valószínűleg nem várandós.

**Érvénytelen:** Nincs vonal a (C) kontroll régióban, még akkor sem, ha egy vonal megjelenik a teszt régióban (T)

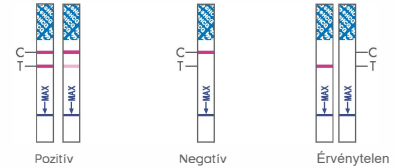

## Gyakran Ismételt Kérdések

**K: Befolyásolhatják-e gyógyszerek vagy egészségügyi állapotok az eredményt?**

**V:** A hCG-t tartalmazó termékeségi gyógyszerek (például Pregnyl, Profasi, Novare) befolyásolhatják az eredményeket. Ezeket a gyógyszereket gyakran injekció formájában adják be, és a beadás után röviddel végzett vizsgálat téves pozitív eredményt adhat. Alkohol, orális fogamzásgátlók, fájdalomcsillapítók, antibiotikumok vagy hormonterápiás gyógyszerek, amelyek nem tartalmaznak hCG-t, nem befolyásolhatják a leletet. Ha váratlan eredményt kap, forduljon orvosához.

**K: Mi van, ha a teszt negatív?**

**V:** Ez több okból is megtörténhet. Legalább 48 óra elteltével érdemes újra tesztelni.

**K: Befolyásolja-e az eredményeket az elfogyasztott folyadék mennyisége?**

**V:** A túlzott folyadékbevitel hígíthatja a vizeletet, így a hCG mennyisége nem megfelelően kimutatható. Ezért nem tanácsos megváltoztatni a normál folyadékfogyasztást.

**K: A két régió vonalainak színe között látványos különbség van. Ez aggodalomra ad okot?**

**V:** Nem, a színbeli eltérés nem befolyásolja a teszt eredményét.

**K: Értelmezhető-e a teszteredmények több mint 5 perc után?**

**V:** Nem. A teszteredményeket 5 percen belül kell leolvasni, majd a félreértés elkerülése érdekében el kell dobni a tesztet. Bár a pozitív eredmény nem változhat jó néhány napig, a negatív eredmény a tesztperiódus befejezése után percek belül hamis pozitívvá változhat, ami nem lenne pontos leolvásás.

**K: A tesztelés alatt rózsaszín háttérszín és függőleges csíkok jelentek meg az eredményterületen. Ez aggodalomra ad okot?**

**V:** Nem. Minden vizeletminta kémiai összetétele eltérő, csakúgy, mint a levegő páratartalma a vizsgálóhelységen. A fizikai körülmények ilyen eltérései függőleges csíkozást és/vagy rózsaszín-rózsaszín háttérszínt okozhatnak, de nem befolyásolják a vizsgálati eredményeket. Amíg a kontrollvonal 3-5 percen belül megjelenik, a teszt megfelelően működik.

## Femometer App

- Olvassa le a teszteredményeket – nincs több találgatás!
- Vizuális eredménylista
- Tudjon meg többet a terhességről.



**Töltse le a femometer appot ingyen!**  
iOS és Android

More information, visit [www.femometer.com](http://www.femometer.com)

